

# 超高齢社会に向けた ストーマケアのために

漏れない、皮膚障害をおこさないために  
今までの装具選択とケア、もう一度見直してみませんか？

コンバテックの  
モルダブルテクノロジー™






## コンバテックの モルダブルテクノロジー™

臨床研究によって証明された確かな皮膚保護効果  
自然な巻き戻りで、ストーマ近接部を優しく保護します。

# 高齢化をとりまく現状


- ストーマ保有者の平均年齢は69.8歳であり、そのうち70歳以上が61.3%を占める  
(2019年社団法人 日本オストミー協会 第8回生活実態基本調査報告書)
- 2025年、高齢者人口は約3500万人、全人口の3割  
(2018年、厚生労働省、第2回介護施設等の在り方に関する委員会資料1)

70歳以上の  
ストーマ保有者

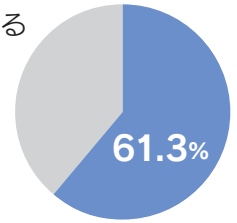

⇒ その他、DPC(診断群分類包括評価)による入院期間短縮に伴い、患者のセルフケア習得への影響が考えられる

## セルフケア、第三者ケア(介助者)ともに 生活環境などの変化に対応するストーマ装具

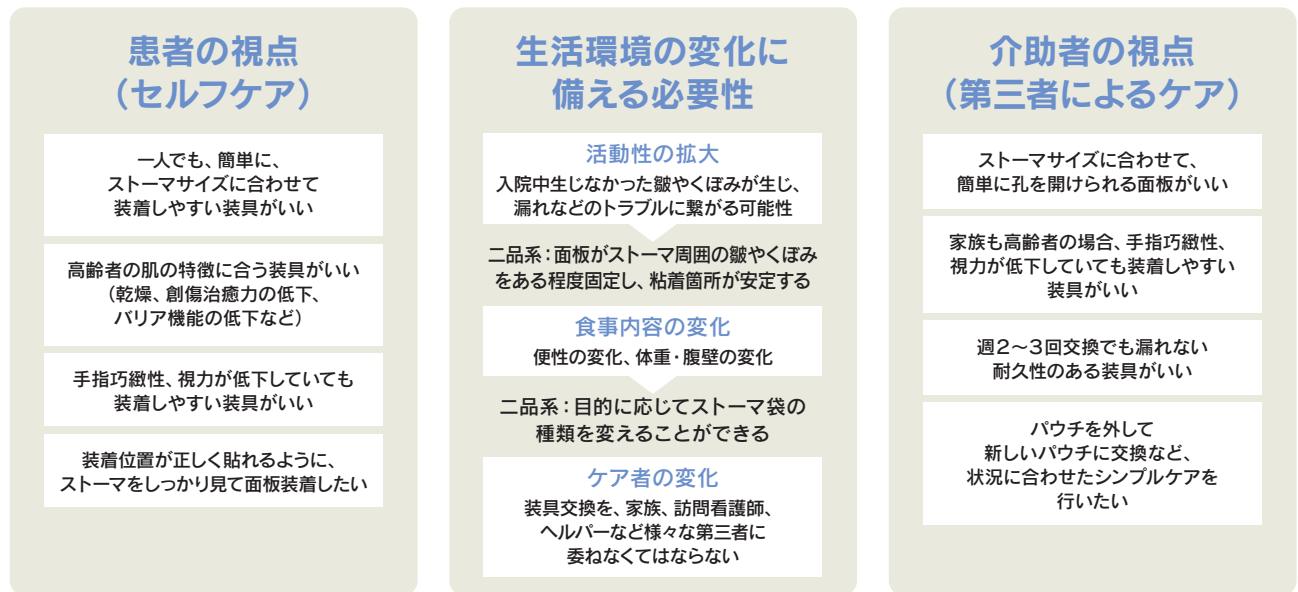

- ストーマサイズにあわせた面板ストーマ孔が簡単に開けられる
- シンプルケアで長期貼付できる漏れない装具

## 装具選択で重要な点は 漏れない、皮膚障害を起こさないこと

ストーマ近接部の皮膚に  
面板を安定して  
密着させること

ストーマ近接部へしっかり  
“フィット”し、  
隙間を作らないこと

腸蠕動で変化する  
ストーマサイズに、  
常に柔軟に対応できること

モルダブルは日々変化するストーマサイズへ自然にフィットし、常に隙間の無い状態を保つことができる

上記3つの必要因子に、全て対応可能なのが  
コンバテックのモルダブル™テクノロジー

# コンバテック モルダブル テクノロジー™の特長


隙間なく、漏れも少ない優れた皮膚保護剤が、  
ストーマ近接部を強力に保護します。

## 特長 1 指で成形、ハサミは不要




皮膚保護剤を指で巻き広げて成形することで、さまざまな形状やサイズのストーマに対応可能。正確にストーマサイズを測る必要も、ハサミを使う必要もありません。

## 特長 2 リバウンディングメモリー™

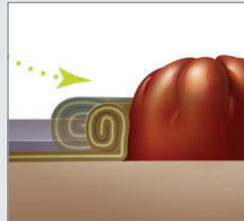


皮膚保護剤が自然に巻き戻り、日々変化するストーマにも隙間をつくりません。

## 特長 3 タートルネック作用

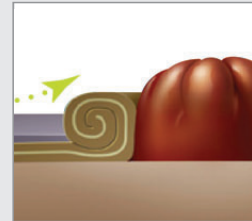


水分に触れると皮膚保護剤部分が膨潤し、タートルネックのようにストーマ近接部にフィットし、より強力に隙間を塞ぎます。

## ストーマの高さと形状について

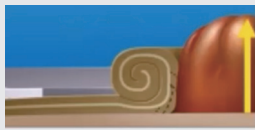

ストーマの高さが  
もっとも低い時で  
5mm以上

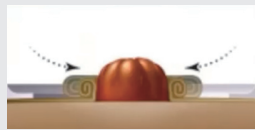

ストーマの形状は  
円柱型または  
マッシュルーム型


## モルダブルを使用する有用性

時間、手間の削減

排泄物の付着から皮膚を保護



ストーマサイズの変化に対応し  
漏れのリスク低減

## 臨床使用によって証明されている高い皮膚保護力

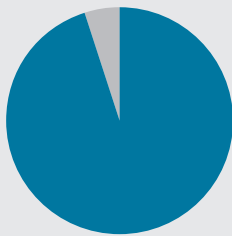


**95%以上が**  
皮膚を健康な状態

コンバテック モルダブル テクノロジー™  
採用製品を使用して60日目の新規ストーマ  
造設者は、95%以上が皮膚を健康な状態  
に保っています。\*

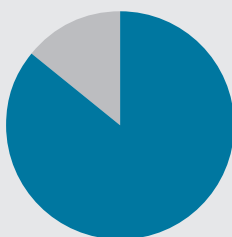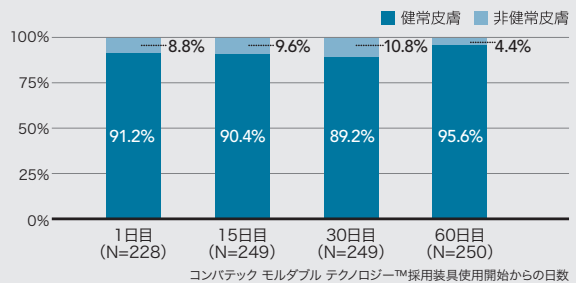

**86%以上が**  
皮膚トラブルを改善

コンバテック モルダブル テクノロジー™  
採用製品を使用して60日目のストーマ保  
有者の86%以上が、皮膚トラブルを改善し  
ています。\*

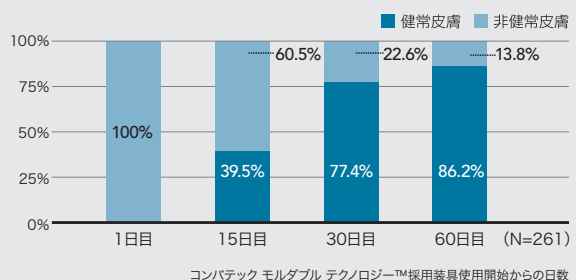

\*Szewczyk MT, Majewska G, Cabral MV, Hölzel-Piontek K, The effects of using a moldable skin barrier on peristomal skin condition in persons with an ostomy: results of a prospective, observational, multinational study, OWM 2014

# モルダブル ラインアップ使い分け表

| 腹壁のかたさ<br>ストーマの高さ | かたい<br>1縦指以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ふつう<br>1縦指以上                                                                                                                                                                                                 | やわらかい<br>2縦指以上 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                   | <p><b>二品系 固定型</b></p> <p>パリアケア® ナチュラ™ Mフランジ      デュラヘーシブ® ナチュラ™ Mフランジ</p> <p>ナチュラMフランジシリーズはその固定型面板でストーマ周囲腹壁に安定面を作ります。</p> <p><b>二品系 浮動型</b></p> <p>パリアケア® ナチュラ™ Mフランジ アコーティオン®      デュラヘーシブ® ナチュラ™ Mフランジ アコーティオン®</p> <p>エスティームモルダブルより固い面板で、デュラヘーシブもあるので、耐久性が必要な場合はこちらがオススメ</p> <p><b>単品系</b></p> <p>エスティーム™ モルダブル</p> <p>柔らかい単品系のエスティームモルダブルは、術直後から使用が可能です。</p> | <p><b>二品系 固定型</b></p> <p>パリアケア® ナチュラ™ ソフトMフランジ</p> <p>デュラヘーシブ® ナチュラ™ ソフトMフランジ</p> <p>ナチュラMフランジシリーズはその固定型面板でストーマ周囲腹壁に安定面を作ります。</p> <p>デュラヘーシブ® ナチュラ™ MCフランジ</p> <p>固定型硬性凸面型面板のナチュラMCフランジは柔らかい腹壁に安定面を作ります。</p> |                |

\*連結するしわや皮膚のたるみがあるとき、伸ばせるときは極力伸ばしてストーマ周囲皮膚を平坦にしてから面板を貼ります。伸ばせないときはアクセサリーを使って補正してから面板を貼ります。必要に応じてオストミーベルトを使用します。

**パリアケア (デュラヘーシブ) ナチュラMフランジ** の適応

**パリアケア (デュラヘーシブ) ナチュラソフトMフランジ**

- 腹壁の硬さ：硬い～柔らかい 一縦指以下、二縦指以上
- 腹壁の形状：山型～平坦
- ストーマの高さ：突出10mm以上

**デュラヘーシブ ナチュラMCフランジ** の適応

- 腹壁の硬さ：普通～やわらかい 二縦指以上
- 腹壁の形状：陥凹
- ストーマの高さ：突出10mm以上


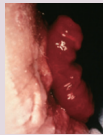
**パリアケア (デュラヘーシブ) ナチュラMフランジアコーティオン** の適応

**エスティームモルダブル**




- 腹壁の硬さ：硬い～普通 一縦指以下
- 腹壁の形状：山型～平坦
- ストーマの高さ：突出10mm以上

## モルダブル製品に対するストーマ形状の一例

適用した症例

適用しなかった症例


## 高齢患者のセルフケアにおける「モルダブル」の有用性

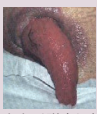● 寿命の伸長に伴い、ストーマをもつ高齢患者の数が増加しているが、退院後、セルフケア能力が低下しその結果、生活の質が低下するケースも多い。

● 高齢者では、入院中の装具交換に関する指示を理解し、装具使用・交換する能力が損なわれる可能性があるため、患者の健康状態の適切な術前評価、および便利で適切かつ効果的なストーマ装具の選択が特に重要。

研究では、ストーマ周囲の皮膚炎の発生率が、モルダブルを使用した患者でより低く、それが高齢のストーマ患者のセルフケアの満足度を改善したことを示した。

※コロストミー高齢患者 合計104人 (65～79歳) を、モルダブルの実験群 (56例) と従来の皮膚保護剤の対照群 (48例) にランダムにて評価

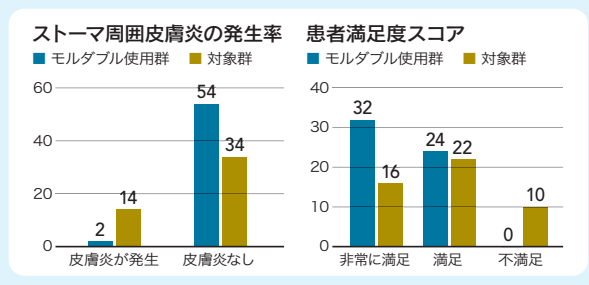

※Liu G, Chen Y, Luo J, Liu A, Tang X. The Application of a Moldable Skin Barrier in the Self-Care of Elderly Ostomy Patients, Society of Gastroenterology Nurses and Associates, 2016

# モルダブル製品ラインアップ

## 二品系

### 浮動型

#### 嵌め込み式 バリケア® ナチュラ™ Mフランジ アコーディオン®

| 注文番号   | フランジサイズ | ストーマサイズ | 入数 | 本体価格※  |
|--------|---------|---------|----|--------|
| 421030 | 57mmAS  | 13~22mm | 5枚 | 3,500円 |
| 421031 | 57mmAM  | 22~33mm |    |        |
| 421032 | 70mmAL  | 33~45mm |    |        |

貼付日数の目安 ●排泄物の性状や発汗量により変化します。  
0 1 2 3 4 5 6 7

※非課税

ハイドロテープ

#### 嵌め込み式 デュラヘーシブ® ナチュラ™ Mフランジ アコーディオン®

| 注文番号   | フランジサイズ | ストーマサイズ | 入数 | 本体価格※  |
|--------|---------|---------|----|--------|
| 421036 | 57mmAS  | 13~22mm | 5枚 | 5,000円 |
| 421037 | 57mmAM  | 22~33mm |    |        |
| 421038 | 70mmAL  | 33~45mm |    |        |

貼付日数の目安 ●排泄物の性状や発汗量により変化します。  
0 1 2 3 4 5 6 7

※非課税

ハイドロテープ

### 固定型

#### 嵌め込み式 バリケア® ナチュラ™ Mフランジ

| 注文番号  | フランジサイズ | 初孔サイズ | ストーマサイズ  | 入数 | 本体価格※  |
|-------|---------|-------|----------|----|--------|
| 00295 | 45mm    | S     | 13~22mm  | 5枚 | 4,700円 |
| 00296 | 45mm    | M     | 22~33mm  |    |        |
| 00297 | 57mm    | L     | 33~45mm  |    |        |
| 00298 | 70mm    | XL    | 45~56mm* |    |        |

貼付日数の目安 ●排泄物の性状や発汗量により変化します。  
0 1 2 3 4 5 6 7

※非課税

ハイドロテープ

\*XL(00298)の初孔の形は楕円です。

#### 嵌め込み式 バリケア® ナチュラ™ ソフトMフランジ

| 注文番号   | フランジサイズ | 初孔サイズ | ストーマサイズ  | 入数  | 本体価格※  |
|--------|---------|-------|----------|-----|--------|
| 413421 | 45mm    | S     | 13~22mm  | 10枚 | 9,400円 |
| 413422 | 45mm    | M     | 22~33mm  |     |        |
| 413423 | 57mm    | L     | 33~45mm  |     |        |
| 413424 | 70mm    | XL    | 45~56mm* |     |        |

貼付日数の目安 ●排泄物の性状や発汗量により変化します。  
0 1 2 3 4 5 6 7

※非課税

アクリルテープ

\*XL(413424)の初孔の形は楕円です。

#### 嵌め込み式 デュラヘーシブ® ナチュラ™ Mフランジ

| 注文番号  | フランジサイズ | 初孔サイズ | ストーマサイズ  | 入数 | 本体価格※  |
|-------|---------|-------|----------|----|--------|
| 00305 | 45mm    | S     | 13~22mm  | 5枚 | 6,230円 |
| 00306 | 45mm    | M     | 22~33mm  |    |        |
| 00307 | 57mm    | L     | 33~45mm  |    |        |
| 00308 | 70mm    | XL    | 45~56mm* |    |        |

貼付日数の目安 ●排泄物の性状や発汗量により変化します。  
0 1 2 3 4 5 6 7

※非課税

ハイドロテープ

\*XL(00308)の初孔の形は楕円です。

#### 嵌め込み式 デュラヘーシブ® ナチュラ™ ソフトMフランジ

| 注文番号   | フランジサイズ | 初孔サイズ | ストーマサイズ  | 入数  | 本体価格※   |
|--------|---------|-------|----------|-----|---------|
| 413417 | 45mm    | S     | 13~22mm  | 10枚 | 12,470円 |
| 413418 | 45mm    | M     | 22~33mm  |     |         |
| 413419 | 57mm    | L     | 33~45mm  |     |         |
| 413420 | 70mm    | XL    | 45~56mm* |     |         |

貼付日数の目安 ●排泄物の性状や発汗量により変化します。  
0 1 2 3 4 5 6 7

※非課税

アクリルテープ

\*XL(413420)の初孔の形は楕円です。

#### 嵌め込み式 硬性凸面 デュラヘーシブ® ナチュラ™ MCフランジ

| 注文番号  | フランジサイズ | 初孔サイズ | ストーマサイズ | 入数  | 本体価格※   |
|-------|---------|-------|---------|-----|---------|
| 00264 | 45mm    | S     | 13~22mm | 10枚 | 14,510円 |
| 00265 | 45mm    | M     | 22~33mm |     |         |
| 00266 | 57mm    | L     | 33~45mm |     |         |

貼付日数の目安 ●排泄物の性状や発汗量により変化します。  
0 1 2 3 4 5 6 7

※非課税

アクリルテープ

ストーマ袋は、消化管用、尿路用と、各種ございますので、別途カタログなどの情報をご覧ください、適切なものをご選択ください。

## 単品系

### エスティム™ モルダブル

| 注文番号   | 色  | 初孔サイズ | ストーマサイズ | 入数  | 本体価格※  |
|--------|----|-------|---------|-----|--------|
| 413515 | 透明 | M     | 21~30mm | 10枚 | 5,500円 |
| 413516 |    | L     | 31~40mm |     |        |
| 413517 | 肌色 | XL    | 41~50mm | 10枚 | 5,500円 |
| 413521 |    | M     | 21~30mm |     |        |
| 413522 |    | L     | 31~40mm |     |        |
| 413523 |    | XL    | 41~50mm |     |        |

貼付日数の目安 ●排泄物の性状や発汗量により変化します。  
0 1 2 3 4 5 6 7

※非課税

フィルター付き

| 注文番号   | 色  | 初孔サイズ | ストーマサイズ | 入数  | 本体価格※  |
|--------|----|-------|---------|-----|--------|
| 413518 | 透明 | M     | 21~30mm | 10枚 | 5,400円 |
| 413519 |    | L     | 31~40mm |     |        |

貼付日数の目安 ●排泄物の性状や発汗量により変化します。  
0 1 2 3 4 5 6 7

※非課税

フィルターなし

## モルダブルの症例集

※実際の症例をぜひご覧ください

単品系 (ワンピース)

<https://bit.ly/3p05VZ2>



二品系 (ツーピース)

<http://bit.do/fSkMf>



LINE 公式アカウント  
医療従事者用  
友だち募集中!



ConvaTec